



Helago-Pharma GmbH & Co. KG

Product flyer





Table of contents

dentipur[®]
Proven denture care



Made in Germany



dentipur®

Proven denture care



*dentipur® quick cleaning tab/et
for fast, hygienic deoning and
disinfection for dentures and broces*

*dentipur® Premium Adhesive Cream
with chomomile and soge for all-doy perfect
fit due to super odhesive power*

*dentipur® denture brushes
for thorough and gentle deoning*

*dentipur® gel for quick, gentle,
intensive deoning with the brush*

*dentipur® cleoning con
for hyg1enic cleoning and safe storage*





Helago® pleieolje 50ml

Med kamille og salvie for pleie av irritert munnslimhinne og hud - uten konserveringsmidler-
Vår utprøvde klassiske Helago® pleieolje har blitt verdsatt av forbrukere, tannleger, apotekere og
tannteknikere i flere tiår.

Helago® pleieolje inneholder ingen konserveringsmidler, alkohol eller kunstige smaker eller lukt. Det er
derfor spesielt egnet for regelmessig og langvarig bruk hos eldre mennesker og barn.

Anbefalt bruk:

Oral mucosal betennelse

Tryktpunkter (f.eks. Fra tannproteser)

Såret nese (med rennende nese)

Solforbrenning - brannskader

Hudskader, riper

Rhagades (sprekker i huden)

Insektbiter

For å forhindre eller lindre tryktpunkter forårsaket av tannproteser eller ved utilstrekkelig
spyttproduksjon, påføres en til to dråper Helago® pleieolje på kontaktsiden av protesen.

Når tannprotesen settes inn, sprer oljen seg som en film over hele overflaten.

Vi anbefaler at du ikke spiser eller drikker i omtrent 15 minutter etter at du har brukt
Helago® pleieolje i munnhulen.

Tips for å venne seg til nye proteser

1

Å venne seg til protesen

Å venne seg til en protesen krever tålmodighet, da den i begynnelsen oppleves som et fremmed legeme.

2

Smerte og ubehag

Noen ganger oppstår det betennelse eller trykkpunkter som kan være smertefulle og ubehagelige. I slike tilfeller kan du ta vare på tannkjøttet og ganen med det velprøvde **Helago Care Oil**. Ved langvarig ubehag, vennligst besøk tannlegekontoret ditt.

3

Taleproblemer

Innledende problemer med tale og tygge kan bedres ved å øve på å snakke høyt.

4

Uten klager ved tygging

Tygging uten klager læres lettere hvis man velger myk mat de første dagene, tar små biter og tygger sakte.

Protesestell og munnhygiene

Grundig stell av proteser og munnhygiene er forutsetninger for god funksjon og toleranse av protesen.

De høy kvalitet dentipur-produktene er utviklet spesifikt for dette formålet.

6

Presis tilpasning av protesen

Hvis presisjonen av tilpasningen av en tannprotesen forringes over tid, sikrer dentipur premium binding krem en sikker forankring.

Vær sikker på å ta opp problemet under neste besøk til tannlegen.





Contact



Best Dental Trading

Telefon 75 64 65 66

E-Mail bestdental@bestdental.no

Internet www.bestdental.no